



allergo-dental

## Allergietest - Ärzte & Therapeuten

### Zum Schutz der Gesundheit unserer Patienten

Allergien und Unverträglichkeiten können durch nahezu jedes körperfremde Material ausgelöst werden. Dazu gehören Zahnmaterialien, Gelenkprothesen, Brustimplantate, Piercings, Gefäß-Stents, Zahnimplantate und viele weitere. Der beste Zeitpunkt für eine Allergie-Diagnostik ist vor dem Einsatz eines neuen Materials in den Körper. Leider beginnt die Suche nach möglichen Auslösern häufig erst, wenn Beschwerden auftreten.

#### Welche Symptome können auftreten?

Wissenschaftliche Studien und medizinische Experten haben belegt, dass körperfremde Materialien verschiedenste Beschwerden auslösen können:

- **Kunststoffe:** Juckende Hautkzeme, Schleimhautveränderungen, Bluthochdruck, Gelenkschmerzen, Magen-Darm-Störungen, Sehstörungen, Kopfschmerzen, Schwindel, psychische Veränderungen und mehr.
- **Gold:** Hautkzeme, Rötungen, Juckreiz, Schwellungen, teilweise auch Hauterscheinungen ohne direkten Kontakt, wie um die Augen herum.
- **Amalgam:** Quecksilber aus Amalgam gilt als dreimal giftiger als Arsen. Es kann Schlaflosigkeit, neurologische Störungen und depressive Phasen auslösen. (Hinweis: Amalgam ist ab dem 01.01.2025 in der EU verboten.)

Eine Vielzahl von Studien zeigt, dass Beschwerden wie Muskelverspannungen, Müdigkeit, Depressionen, Kopfschmerzen und weitere Symptome bei vielen Patienten nach der Entfernung problematischer Materialien deutlich zurückgehen.

#### Warum ist Zahnersatz besonders kritisch?

Zahnersatzmaterialien stehen besonders im Fokus, da sie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche mit dem Körper in Kontakt sind. Dieser permanente Einfluss macht eine sorgfältige Testung im Vorfeld umso wichtiger.

# Wie funktioniert die Testung?

## Anleitung zur Vorbereitung und Durchführung einer Allergietestung auf körperfremde Materialien

### Wichtiger Hinweis:

Wenn der Patient bisher keinen Kontakt mit dem neuen Material hatte, muss eine Antikörper-Bildungszeit eingeplant werden, um eine zuverlässige Allergiediagnose zu ermöglichen.

1. Materialproben vorbereiten	
1.1 Materialzustand:	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Proben</b> müssen im <b>Endverarbeitungszustand</b> vorliegen (nicht flüssig).</li><li>• Größe der Probe sollte ca. 0,5 cm betragen.</li></ul>
1.2 Materialbehandlung:	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Metalle:</b> Aus dem Ofen. Gebrannt und mit Polierpaste bearbeitet (anschließend gereinigt).</li><li>• <b>Keramik:</b> Gebrannt und bearbeitet.</li><li>• <b>Kunststoffe/Zemente/Kleber:</b> Ausgehärtet.</li><li>• <b>Implantate:</b> Am besten eine Schraube statt eines Plättchens, da häufig mehrere Materialien im Außenbereich verarbeitet werden.</li></ul>
1.3 Materialangabe:	Exakte Bezeichnung der Materialien auflisten (nicht nur Überbegriffe wie „Metall“ oder „Kunststoff“).
2. Vorbereitung des Patienten auf die Testung	
2.1 Probenkontakt zur Antikörperbildung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Patient nimmt die Materialproben für <b>5 Minuten in den Mund</b>.</li><li>• <b>Zweck:</b> Auslösung einer Antikörperreaktion zur späteren Testung. Eine allergische Speichelreaktion ist häufig erst nach einem zweiten Kontakt mit dem Material möglich. Bei <b>Hochallergie-Patienten</b>, vorab einen Hautauflage-Test durchführen (siehe FAQ).</li></ul>
2.2. Wenn das Material bereits implantiert ist:	Keine Antikörper-Bildungszeit notwendig – Testung kann sofort beginnen.
2.3 Antikörper-Bildungszeit abwarten	<p><b>Wartezeit: 5–14 Tage</b> nach dem ersten Kontakt zur Antikörperbildung.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Erst nach dieser Zeit kann die eigentliche Allergiediagnostik beginnen.</li></ul>

<b>3. Durchführung der Allergietestung</b>	
<b>1. Testkit:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestellen Sie das Testkit in <b>unserem Shop</b> <a href="https://allergo-dental.de/sallergo-shop/">https://allergo-dental.de/sallergo-shop/</a></li> <li>• Testkits bestellen – abhängig von der Anzahl der zu testenden Proben</li> <li>• Möchten Sie ein <b>Implantat</b> testen, müssen <b>mindestens 4 Proben</b> bestellt werden (Implantat, Kronengerüst, Kronenverblendung und Zement/Kleber)</li> <li>• Folgen Sie den <b>Anweisungen</b> auf dem Testkit</li> </ul>
<b>2. Bereits implantierte Materialien:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es gelten die gleichen Probenvorgaben (Zustand, Größe). Testen Sie <b>alle Materialien</b>, die bereits eingesetzt worden sind.</li> <li>• <b>Probenlimit:</b> Maximal 8 Proben pro Tag testbar (Qualitätsverlust des Speichels bei mehr Proben).</li> <li>• Folgen Sie den Anweisungen auf dem Testkit</li> </ul>
<b>3.3 Zusammenfassung der Zeitschritte</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proben in den Mund nehmen (5 Minuten).</li> <li>2. 5–14 Tage Antikörperbildungszeit abwarten.</li> <li>3. 15–35 Tage Allergiediagnostik durchführen (Testergebnisse innerhalb von 3 Wochen).</li> <li>4. Ab Woche 5: OP oder Präparation des Materials planen.</li> </ol>
<b>4. Sonderfälle und Ausnahmen</b>	
<b>4.1 Flüssige oder cremige Materialien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht testbar mit dem Speicheltest.</li> <li>• Keine Flüssigmaterialien testen! Alternativen in FAQ prüfen.</li> <li>• Weitere Informationen dazu in den FAQ einsehen.</li> </ul>
<b>5. Dauer der Auswertung / Terminplanung</b>	
<b>5.1 Gesamtdauer der Testergebnisse:</b>	3 Wochen + 5 Tage für die Reaktionszeit nach Probenkontakt.
<b>5.2 Terminplanung</b>	Termin für OP oder Präparation des Materials frühestens 4 Wochen nach Testbeginn einplanen.

Hier erfahren Sie mehr über die bereits diagnostizierten Beschwerdebilder:

Buch C. D'Mexis: „[Zahnmaterialien ihre Wirkung auf Körper Kopf und Psyche](#)“ (MGO-Fach-Verlag)

Buch ZA Dr. Dominik Nischwitz „[In aller Munde](#)“

Buch Dr. Joachim Mutter „[Lass Dich nicht vergiften](#)“

Ihr allergo-dental-Team – [www.allergo-dental.de](http://www.allergo-dental.de) - Mannheim

## Haftungsausschluss für Therapeuten und Ärzte

Dieser Haftungsausschluss richtet sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal, einschließlich Therapeuten, Ärzte und Zahnärzte. Er gilt nicht für Privatpersonen.

**Informationszweck:** Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung über die Durchführung und Anwendung von Allergietests auf körperfremde Materialien im medizinischen Kontext. Sie ersetzen weder eine individuelle medizinische Beratung noch eine eigenständige Diagnose durch qualifiziertes Fachpersonal.

**Haftungsbegrenzung:** Trotz sorgfältiger Prüfung der Inhalte übernimmt der Herausgeber keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der Informationen. Die Anwendung der hier beschriebenen Methoden erfolgt auf eigenes Risiko und ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal. Jegliche Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung oder Interpretation entstehen, ist ausgeschlossen.

**Keine Heilungs- oder Erfolgsgarantie:** Die in diesem Dokument beschriebenen Verfahren und Empfehlungen garantieren weder Heilung noch den Erfolg einer Therapie. Jede medizinische Maßnahme ist individuell an die Patientenbedürfnisse anzupassen und bedarf der sorgfältigen Abwägung durch das Fachpersonal.

**Einhaltung gesetzlicher Vorgaben:** Die Durchführung der beschriebenen Tests und Maßnahmen muss im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und den geltenden Standards der jeweiligen Berufsverbände erfolgen. Der Anwender trägt die alleinige Verantwortung für die Einhaltung dieser Vorgaben.

**Verwendung durch Fachpersonal:** Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließlich für geschultes medizinisches Fachpersonal bestimmt. Die Weitergabe oder Anwendung durch unqualifizierte Personen ist unzulässig und kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Bei Fragen oder Unsicherheiten wird empfohlen, sich mit dem Hersteller oder einem qualifizierten Experten in Verbindung zu setzen.

## Widerrufsbelehrung und Widerrufsformular für Verbraucher

„Verbraucher“ im Sinne dieser Widerrufsbelehrung ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

### Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (allergo-dental, Friedhofstr. 5, 68199 Mannheim, E-Mail-Adresse: [info@allergo-dental.de](mailto:info@allergo-dental.de), Telefonnummer: +49 (0)621-8760830) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

## Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

## Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An

allergo-dental, Friedhofstr. 5, 68199 Mannheim, E-Mail-Adresse: info@allergo-dental.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (\*) den von mir/uns (\*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (\*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (\*)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Bestellt am (\*) \_\_\_\_\_ / erhalten am (\*) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Name des/der Verbraucher(s)

\_\_\_\_\_  
Anschrift des/der Verbraucher(s)

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

\_\_\_\_\_  
Datum

(\*) Unzutreffendes streichen.

## Hinweise zur Rücksendung von Waren

Die folgenden in diesem Abschnitt genannten Modalitäten, sind nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts.

Bitte senden Sie die Waren nicht unfrei an uns.

Bitte senden Sie die Waren als frankiertes Paket an die angegebene Rücksendeadresse zurück und bewahren Sie bitte den Einlieferbeleg auf.

Bitte vermeiden Sie Beschädigungen oder Verunreinigungen der Ware.

Bitte senden Sie die Ware nach Möglichkeit in Originalverpackung und Umverpackung mit sämtlichem Zubehör und allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Sind die Originalverpackung oder die Umverpackung nicht mehr in Ihrem Besitz, sollte eine andere geeigneten Verpackung verwendet werden, um für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden zu sorgen und etwaige Schadensersatzansprüche wegen Beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden.

**Der Sallergo-Speicheltest ist eine Privatleistung.**

**Folgende Abrechnungs Ziffern können für die Entnahme der Speichelproben abgerechnet werden:**

**Arzt/Zahnarzt:** : Ä3, Ä6, 4015a, GoÄ 298 pro Material  
**Heilpraktiker:** GebüH 1 GebüH 5, GebüH 12.13 pro Material